

kit Neonatal

Teste de pezinho
"screenig" neonatal

Exame:

- Perfil master | Perfil plus | Perfil ampliado | Perfil básico
 Exames opcionais e/ou individuais – marque com "X" no Menu de exames

Menu de exames

EXAMES	PERFIS								
	MASTER		PLUS			AMPLIADO		BÁSICO	
	PEPMH	PEPM	TEPP	PEPPE	PEPP	PEPA	PEPAE	PEBAS	PEBAS
<input type="checkbox"/> TSHN (TSH NEONATAL)									
<input type="checkbox"/> PKU (FENILALANINA)									
<input type="checkbox"/> NT4 (T4 NEONATAL)									
<input type="checkbox"/> AACCR (CROMATOGRAFIA DE AMINOÁCIDOS)									
<input type="checkbox"/> NHPAT (HEMOGLOBINOPATIAS)									
<input type="checkbox"/> IRT (TRIPSINA IMUNO-REATIVA)									
<input type="checkbox"/> 17AN (17-OH-PROGESTERONA)									
<input type="checkbox"/> GALTO (GALACTOSE+ GALACTOSE-1 FOSFATO)									
<input type="checkbox"/> BIOTTI (ATIVIDADE DA BIOTINIDASE)									
<input type="checkbox"/> G6PD (GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE)									
<input type="checkbox"/> NTOXM (TOXOPLASMOSE NEONATAL – ANTICORPOS IgM)									
<input type="checkbox"/> SIFTN (SÍFILIS TOTAL – NEONATAL)									
<input type="checkbox"/> NRUBM (RUBÉOLA NEONATAL – ANTICORPOS IgM)									
<input type="checkbox"/> NCMVM (CITOMEGALOVÍRUS NEONATAL – IgM)									
<input type="checkbox"/> CHANE (CHAGAS NEONATAL)									
<input type="checkbox"/> HIVN (HIV NEONATAL)									



kit Neonatal

Teste de pezinho / "screenig" neonatal



Laboratório:

Cidade:

Paciente/RN:

Data da coleta: / /

Data de nascimento: / /

Pais consanguíneos: S N

Parto: normal cesariana

Peso: kg

Sexo: F M

Cor: br pr pd am

Transfusão: S N

Nome da mãe:

Antibióticos: S N

Gemelar: S N (1ª) (2ª) ()

Prematuro: S N

I.G. ___s___d

Nutrição: LM

Fórmula láctea

Enteral

Parenteral

Outros

1ª Amostra

Recoleta

Controle

Responsável pela coleta:

Cole aqui sua etiqueta.

www.dbdiagnosticos.com.br

0800 643 0376

Instruções de coleta – Teste do Pezinho

- Preencha os dados de identificação antes de realizar a coleta.
- Observe a **ilustração indicativa do local de coleta**. Evite locais que já tenham sido anteriormente punccionados ou a curvatura do calcanhar.
- Faça antissepsia do calcanhar com álcool 70° GL, deixando evaporar o seu excesso.
- Friccione a perna para produzir uma maior afluência de sangue ao pé.
- Puncione o calcanhar com um só movimento, contínuo e firme, em um sentido quase perpendicular à superfície da pele, usando uma lanceta estéril, com ponta perfurante menor que 2,5 mm.
- Limpe a primeira gota com gaze esterilizada.
- Permita a formação de uma segunda gota de sangue.
- Encoste a gota de sangue no verso do papel-filtro, no centro do círculo, saturando sua área até o aparecimento na frente do papel.
- Caso esteja coletando sangue para outros procedimentos, com seringa ou escalpe e queira colher material para triagem neonatal, basta gotejar o sangue sobre os círculos do papel-filtro, evitando a punção no calcanhar. Esse procedimento é inválido para amostras coletadas com algum tipo de anticoagulante (EDTA, heparina, citrato de sódio, etc.).
- Preencha a **maior área possível dos círculos**.
- Tenha extrema cautela para evitar tocar com a mão ou encostar quaisquer substâncias no papel-filtro usado para a coleta. Somente o sangue do recém-nascido deve entrar em contato com o papel. Utilize luvas descartáveis de proteção individual durante todo o procedimento.
- Deixe secar à **TEMPERATURA AMBIENTE**. Não utilize nenhuma forma de secagem forçada da amostra. O tempo estimado para a secagem é de duas horas. A amostra fica de cor acastanhada quando seca. Certifique-se de que a amostra está totalmente seca antes de acondicioná-la.
- Destaque o cartão de coleta com o filtro, introduza com o material colhido no envelope. Retire a fita do cartão e lacre-o.
- Envie a amostra dentro de 24 horas ao laboratório para análise. Caso deseje guardá-la por mais tempo, coloque-a na geladeira, ao abrigo da luz e protegida contra umidade ou ressecamento, em saco plástico. **AS AMOSTRAS NÃO DEVERÃO SER CONGELADAS.**

Destaque aqui

Dobre aqui

Cartão de coleta

O local escuro é o indicado para a coleta.



Correto

A área sinalizada é a indicada para a coleta.

A área sinalizada é a indicada para a coleta.

Incorreto

INACEITÁVEL
Camadas sobrepostas

INSUFICIENTE
Múltiplas aplicações

INACEITÁVEL
Presença de anéis de soro

Círculos preenchidos com sangue

06 círculos: qualquer perfil
02 círculos: exames individuais

Destaque este cartão, insira no envelope após a coleta e lacre-o com a fita adesiva que se encontra no verso.