

Passo a passo para Alíquota de urina

As urinas enviadas para análise toxicológica devem ser aliqüotadas de acordo com a metodologia analítica de cada exame:

- 1- Cadastrar os exames desejados no pedido gerado pelo sistema;
- 2- O sistema irá gerar a quantidade de etiquetas de acordo com as alíquotas necessárias, ou seja, a quantidade de tubos que devem ser enviados. (Quantidade de etiquetas= Quantidade de tubos);
- 3- Adicionar 5ml de urina em cada tubo de transporte;
- 4- Tampar e manter nas condições recomendadas no guia de exame até a coleta do material pelo motorista do DB.

ATENÇÃO: Em análises ocupacionais, para a maioria dos exames, a creatinina é necessária para o cálculo de correção final do resultado. Desta forma, deve ser enviada uma amostra para a dosagem de creatinina urinária, conforme etiqueta gerada pelo sistema.

Entendendo o processo:



O volume a ser enviado sempre irá aparecer como 0,00 na etiqueta, portanto esse valor deve ser desconsiderado. **Sempre enviar 5ml de urina em cada tubo de transporte (tubo cheio).**

Descrição do meio de coleta do material (FE + Código de cada método)
FE = Frasco estéril



EXEMPLO

Exames: AH, ACTRA, AMH, ADAL, 25HXD

Perfil atual de etiquetas



Perfil do novo modelo aliqüotado pelo cliente



ATENÇÃO:

- Tubos com volume de amostra inferior a 5ml não serão aceitos pelo DB
- Cuidado ao cadastrar em um mesmo pedido material de início e final de jornada.
- Conferir se o material a ser aliqüotado corresponde ao descrito na etiqueta.