

Instruções de coleta em Tubo Trace - SORO


Instruções de preparo

Jejum: Jejum aconselhável de 4 horas (vide Guia de exames).

Instruções de coleta

A coleta deve ser realizada em tubo isento de metais (Trace - Tampa Branca), preferencialmente à vácuo para evitar o contato com seringas de plástico que podem contaminar a amostra e produzir resultados falsamente elevados. Não há necessidade de homogeneização da amostra, aguardar a coagulação da amostra, o tempo entre coleta e centrifugação pode ser de até 2 horas. Se possível, a amostra deve ser acondicionada em estufa ou ao banho-maria a 37°C para auxiliar na retração e evitar a formação de fibrina no soro.

Depois de centrifugada, a amostra deve ser transferida por inversão (sem uso de nenhum tipo de pipeta) para outro tubo trace, com um movimento único, sem deixar que partes do coágulo se desprendam e se misturem ao material que será enviado ao apoio.

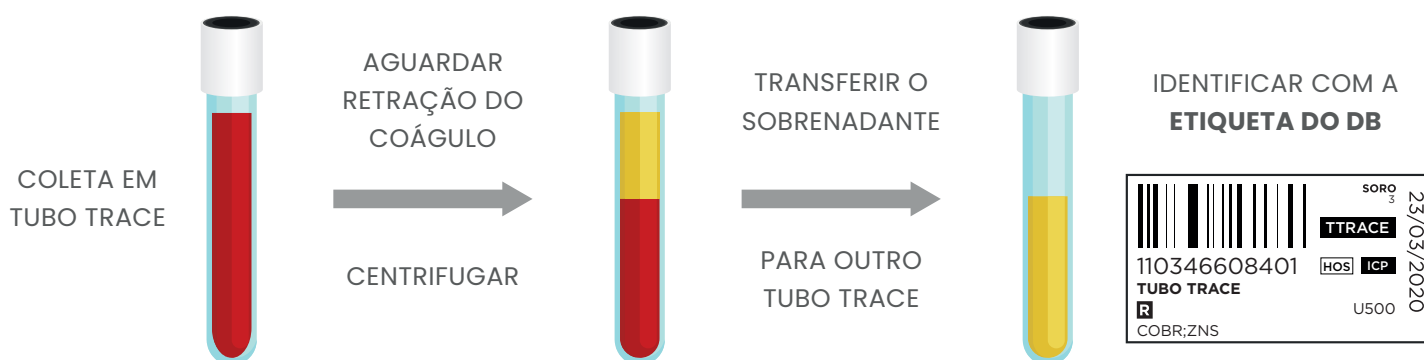

Instruções de distribuição: Transportar refrigerado (2°C a 8°C).

Instruções de estabilidade: Vide Guia de Exames DB.

Instruções de rejeição: Amostras hemolisadas ou em tubo inadequado serão rejeitadas.

ATENÇÃO:

Exames com coleta em tubo trace cujo material seja sangue total ou urina, desconsiderar a etapa de centrifugação.