



CITOGENÔMICA

Instruções pré-analíticas



Manual de coleta de mucosa oral

Informação importante:

Antes da coleta, certifique-se de não ingerir alimentos sólidos ou líquidos e não escovar os dentes por 1 hora.

-  Com cuidado, **abra o coletor rompendo o lacre adesivo**;
-  Esfregue com intensidade o coletor por aproximadamente **30 segundos** na parte interna de cada bochecha;
-  **Retorne a haste** utilizada para o tubo;
-  **Identifique** o tubo;
-  Deposite o tubo identificado na **bag plástica**;
-  Envie o tubo para o laboratório a **temperatura ambiente**.

A qualidade da análise começa na coleta.
Siga as instruções e contribua para um diagnóstico preciso.

Saiba mais

 dbmolecular.com.br

 assessoria.molecular@dbdiagnosticos.com.br

  0800 643 0376