



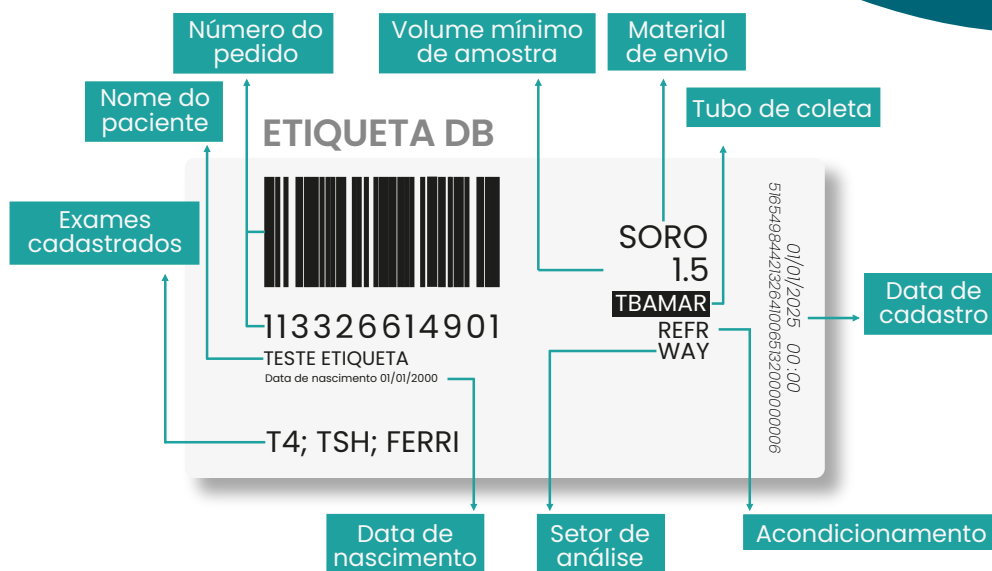


Posição da etiqueta no tubo


A etiqueta deve ser colada na vertical, posicionada a 2cm da parte superior do tubo, podendo-se utilizar a marcação de volume como referência.

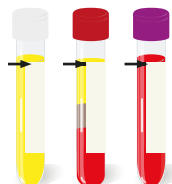

No caso dos tubos de transporte DB, que não possuem marcação de volume, pode-se utilizar a marcação de 4ml como referência.

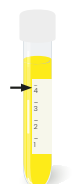

Para o tubo cônico, siga a marcação de 10ml, posicionando a etiqueta a 1,5cm de distância da parte superior do tubo.

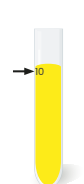

Centrifugação

• Retração do coágulo e tempo de centrifugação

Após a coleta, mantenha os tubos em posição vertical por 30 a 120 minutos para permitir a retração do coágulo. A centrifugação deve ser realizada após esse intervalo para garantir a qualidade da amostra.

• Velocidade e aceleração adequadas

Ajuste a velocidade e aceleração conforme a metodologia de cada análise para garantir resultados precisos e consistentes.

• Balanceamento e agrupamento dos tubos

Balanceie os tubos corretamente e agrupe-os por tipo, tamanho, material e tampa para evitar quebras.

• Recentrifugação e contaminação

Não é recomendada a recentrifugação dos tubos após a formação da barreira de gel, pois os detritos abaixo do gel podem contaminar o sobrenadante e comprometer os resultados.

ACELERAÇÃO E TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO

TIPO	RCF (g)	TEMPO (min)
Tubo de vidro com gel separador e ativador de coágulo	1.000 a 1.300	10
Tubo de plástico com gel separador e ativador de coágulo	1.300 a 2.000	10
	2.000 a 3.000	4 a 5
Tubo com gel separador e anticoagulante	1.000 a 1.300	10
Tubo sem gel separador	≤ 1.300	10
Tubo contendo citrato*	1.500	15
Tubo com gel separador e com acelerador de coagulação	1.500 a 1.700	10

*Atentar-se ao procedimento de centrifugação descrito no **Guia de Exames**, que utiliza método específico para a obtenção de plasma pobre em plaquetas.