

4 > Processo de coleta

Siga o passo a passo para realizar o processo de **coleta do cabelo ou pelo do doador**:

1



Primeiramente, é preciso conferir se o **kit de coleta** está completo.

2




É necessário ter na sala de coleta: **tesoura e luvas**.

3




Devem ficar apenas três pessoas na sala durante o processo de coleta (**coletor, doador e testemunha**).

4

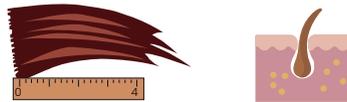

O cabelo precisa obrigatoriamente ter **4 cm de comprimento**. Caso não tenha esse mínimo necessário, a coleta deve ser feita com pelos do corpo.

5

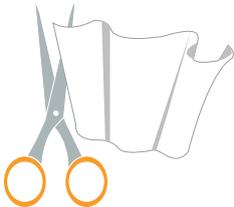

Higienize a tesoura para coleta de cabelo

6



Dobre levemente

Prepare o alumínio para receber a amostra de cabelo ou pelo.

7


Separe uma quantidade de cabelo equivalente à **espessura de um lápis** ou **120 fios**. O tamanho do material, para janela de 90 dias, deverá ter no mínimo 3,5 cm de comprimento.

8


Corte o **mais próximo da raiz**. Caso necessário, corte mechas de diferentes regiões da cabeça evitando danos estéticos.

9

Para a coleta de pelos, escolha uma área com maior quantidade de pelos.

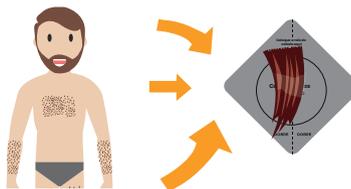
10

Nunca misture cabelos com pelos ou pelos de diferentes regiões do corpo em um mesmo envelope.

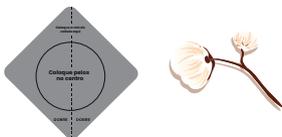11

A quantidade de pelos precisa ser equivalente a **uma bola de algodão com 2 cm de diâmetro**.


Use o copinho de papel para verificar se o volume coletado é suficiente.

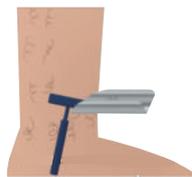12

Raspe os pelos com a lâmina descartável rente à pele. Colete diretamente na folha de alumínio.

13

Raiz —

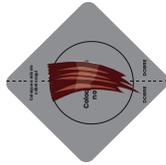

Coloque as mechas de cabelo ou de pelo no papel alumínio com cuidado. Para coleta de cabelo, alinhe as raízes conforme indicado no alumínio.

14


Aperte a folha do alumínio sem amassar, para que a amostra não se espalhe no envelope. Se necessário, dobre mais de uma vez.

15

Coloque a folha de alumínio dentro do envelope de coleta A da amostra e feche-o.

Repita o processo para a amostra B.

Confira o tamanho do cabelo aqui

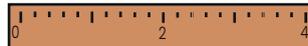

Processo concluído.

Atenção!

Os envelopes A e B devem conter a mesma matriz coletada!
Se a amostra A for cabelo, deve-se coletar cabelo na amostra B.
A mesma regra serve para pelos.

Saiba mais:

DBTOXICOLOGICO.COM.BR
sac.toxicologico@dbdiagnosticos.com.br
0800 640 0380

DB TOXICOLÓGICO