

# Acondicionamento e Envio de Amostra

## Citologia Cérvico-Vaginal Convencional [PAPA]

**Material:** amostras citológicas de colo de útero, ecto e endocervical.

**Volume Mínimo:** 1 lâmina.

**Meio de coleta:** Lâmina Histológica.

**Critérios de rejeição:**

- Lâmina danificada, quebrada;
- Lâmina sem identificação (iniciais do nome da paciente).
- Lâmina contaminada por fungos ou outros.

**Documentos**

- Requisição médica\*.

**Estabilidade da amostra:** até 30 dias.

**Transporte:** em temperatura ambiente.

**Acondicionamento, embalagem e fixação:** Após a coleta, realizada com Espátula de Ayre e Escova Endocervical, feita a distensão em lâmina previamente identificada com as iniciais do nome da paciente e data de nascimento, fazer a fixação imediata conforme abaixo:

**Fixador Citológico de Revestimento (preferencial):**

Pode-se utilizar o fixador spray ou aerossol, respeitando as instruções do fabricante. De forma geral, são realizados da seguinte forma:


- Manter o frasco na posição vertical, segurando a lâmina pela parte fosca.

**A - Fixador Spray:** com o frasco na posição vertical, a aproximadamente 10 cm da lâmina, borrifar 3 vezes, ou o suficiente para cobrir homogeneamente a lâmina, sem que escorra.


**B - Fixador Aerossol:** com o frasco na posição vertical, a aproximadamente 10 cm da lâmina, aplicar o fixador com volume suficiente para cobrir homogeneamente a lâmina, sem que escorra. Armazenar a lâmina em frasco porta-lâminas identificado com nome e data de nascimento da paciente.

1 Após a coleta e com a lâmina identificada na parte fosca;


Sempre identifique a lâmina com as iniciais e data de nascimento.

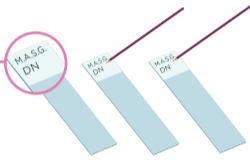

2 Aplicar o fixador citológico em toda a superfície da lâmina (exceto a parte fosca);

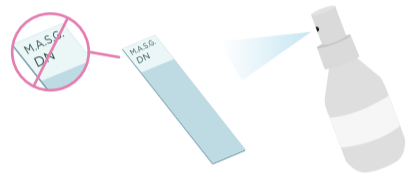

3 Identifique o tubete porta-lâminas com o nome completo e data de nascimento da paciente;

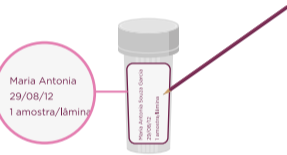

4 Você pode agrupar vários frascos, adequadamente vedados e identificados, e acondicioná-los numa bag secundária (Cód. P: 14394; Cód. G:14395);




5 Para os exames de citologia ginecológica, enrole o pedido médico no tubete para envio. Caso tenha fixado em álcool, coloque o tubete em um saquinho impermeável antes de embrulhar o pedido médico. Em caso de vazamento, o pedido estará protegido.



**Álcool:**  
(sempre que possível, utilize o fixador citológico)

1 Após a coleta, e com a lâmina identificada na parte fosca, colocar a lâmina no tubete e preencher com álcool;

Sempre identifique a lâmina com as iniciais e data de nascimento.

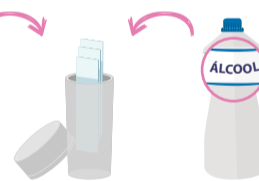

Utilizar preferencialmente, álcool 95%, podendo utilizar até 70%.

2 Identifique o tubete porta-lâminas com o nome completo e data de nascimento da paciente. Utilize lápis para fazer a identificação, pois, se houver vazamento do álcool, a identificação da etiqueta não será apagada;

Maria Antonia  
29/08/12  
1 amostra/lâmina



3 Vede o frasco adequadamente para evitar vazamentos. Sugerimos que seja dada a preferência por fixador citológico de revestimento, devido a superioridade de fixação e segurança contra apagamento de informações da etiqueta.



4 Caso envie com álcool, vede bem o frasco e coloque dentro de um saquinho, amarre e coloque uma etiqueta extra por fora.

